

**ПАСПОРТ**

**ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»**

**ШТАНГА ДВУХОПОРНАЯ (РАМА БАЛКАНСКОГО) МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МСК-116  
ТУ 9452-001-52962725-01**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1. Штанга двухопорная (далее по тексту — штанга) предназначена для использования в травматологических отделениях.
- 1.2. Изделие изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Высота - 1380±10 мм, длина - 2200±10 мм.
- 2.2. Масса не более 14 кг
- 2.3. Характеристики (свойства):
  - 2.3.1. Изделие изготовлено из углеродистой стали.
  - 2.3.2. Рама Балканского крепится к кровати при помощи системы струбцин.
  - 2.3.3. Сборка изделия осуществляется с помощью стандартных крепежных изделий.
  - 2.3.4. Отдельные элементы конструкции имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки изделия
  - Стойка.....2 шт
  - Ползун .....2 шт
  - Струбцина в сборе (стакан, соединитель, зажим с пластиковой рукояткой, болт М10х30, шайба 10 пружинная) — 2 шт.
  - Перекладина.....1 шт

**4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 4.1. Поверхности изделия беречь от механических повреждений
- 4.2. Максимальная нагрузочная способность 50 кг.

**5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. К сборке и эксплуатации изделия допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила эксплуатации.

**6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

- 6.1. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2. Распаковать изделие и проверить целостность покрытий.
- 6.3. Проверить комплектность.

**7. ПОРЯДОК СБОРКИ**

- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
- 7.2. Осуществить сборку согласно инструкции: зафиксировать струбцины на корпусе кровати двумя болтами М10; Закрепить перекладину на стойках при помощи болтов М10; Вставить стойки в стаканы струбцин и фиксировать их зажимами.

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 8.1. Необходима периодическая проверка и подтяжка резьбовых соединений.
- 8.2. Производить очистку поверхностей от загрязнений по мере необходимости.

**9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 9.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.
- 9.2. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

**10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
- 10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
- 10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Штанга двухопорная (Рама Балканского) металлическая МСК-116 \_\_\_\_\_  
Дата выпуска \_\_\_\_\_ М. П.  
Соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока  
Изделие медицинской техники \_\_\_\_\_  
наименование и тип изделия  
\_\_\_\_\_ номер ГОСТ или ТУ  
Номер и дата выпуска \_\_\_\_\_  
Приобретен \_\_\_\_\_  
дата, подпись, штамп торгующей организации

Производитель: ООО «Медстальконструкция»  
Россия, 450024, Рб, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

