

7.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи конечному покупателю.

7.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить гарантийный талон, товарно-транспортную накладную (или УПД), рекламацию и фото/видео материалы, которые могут помочь определить проблему.

7.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу:  
107076, г. Москва, ул. Электrozаводская д.29 стр. 2, 4 этаж, тел. (495) 642-86-62, 988-76-60, E-mail: [service@med-engineering.ru](mailto:service@med-engineering.ru)

#### 8. Свидетельство о приемке

Мебель медицинская – кушетка смотровая медицинская КСМ-01,  
№ \_\_\_\_\_ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических условий ТУ 9452-001-18732063-2016 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

дата производства

**Производитель:**  
ООО «ХИТЭК-ГРУП»  
107076, г. Москва, ул. Электrozаводская, дом 29, стр.2  
Тел.: 8 (495) 995-995-9  
[www.med-engineering.ru](http://www.med-engineering.ru)



**МедИнжиниринг**

## ПАСПОРТ Мебель медицинская Кушетка смотровая медицинская КСМ-01



**Арт. КСМ-01**

## **Мебель медицинская** **Кушетка смотровая медицинская арт. КСМ-01**

### **1. Назначение**

Мебель медицинская – кушетка смотровая медицинская КСМ-01 (далее – кушетка) предназначена для оснащения кабинетов, в том числе косметологических и массажных, палат и лабораторий клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений. Изделие используется для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов.

### **2. Описание.**

- 2.1 Кушетка изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 9452-001-18732063-2016 и имеет РУ №РЗН 2017/5682 от 20.04.2017.
- 2.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных профильных труб с нанесением порошкового полимерного покрытия.
- 2.3 Подъем и опускание головной секции регулируется бесступенчато вручную.
- 2.4 Мягкие элементы выполнены из фанеры, на которую уложен слой поролона, обтянуты искусственной кожей.
- 2.5 Кушетка поставляется в собранном и разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.

### **3. Технические характеристики**

- 3.1 Габаритные размеры:  
Высота общая — 550 мм  
Длина общая — 2070 мм  
Ширина — 610 мм
- 3.2 Углы наклона, град.:  
- угол наклона подголовника – от 0 до 35°
- 3.3 Допустимая равномерно распределённая нагрузка на ложе 160 кг, на подголовник 20 кг.
- 3.4 Масса изделия не более 30 кг.
- 3.5 Материалы, входящие в состав изделия: сталь, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд.
- 3.6 Срок службы изделия – не менее 6 лет.

### **4. Комплектность**

В комплект поставки входит:

- изделие в разобранном или в собранном виде - 1 шт.
- паспорт, содержащий инструкцию по эксплуатации – 1 шт.
- инструкция по сборке – 1 шт.
- гарантийный талон – 1 шт.

Информация о каркасных и крепежных деталях и мягких элементах, входящих в комплект поставки, содержится в инструкции по сборке.

### **5. Правила эксплуатации и меры безопасности.**

- 5.1 Использовать изделие только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок.
- 5.2 Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.
- 5.3 Изделие не предназначено для эксплуатации вне помещения.
- 5.4 При использовании необходимо руководствоваться указаниями инструкции по эксплуатации.
- 5.5 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

### **6. Хранение и транспортировка**

- 6.1 Транспортирование изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:  
-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.  
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°С до +40°С.
- 6.2 Изделие может храниться в течение 5 лет в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:  
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°С до +40°С.  
- относительная влажность при температуре окружающей среды +25°С не более 80%.  
- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

### **7. Гарантийные обязательства.**

- 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
- 7.2. На механические повреждения мягких элементов изделий, полученные в процессе эксплуатации (порезы, царапины, потёртости, пятна от воздействия агрессивных химических веществ), данная гарантия не распространяется.