

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.30 офис 121
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт

Шкаф картотечный

ШК 1/02



РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Тумба предназначена для хранения личных вещей и использования в качестве столика.
- 1.2. Тумба изготовлена из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
1200	500	500	60

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол- во, шт.
1	Стенка боковая (1180*480)	2
2	Крыша (500*500)	1
3	Дно (468*480)	1
4	Панель средняя (468*480)	1
5	Задняя стенка ДВПО (1124*497)	1
6	Цоколь (468*70)	1
7	Фасад ящика (497*180)	6
8	Фальш-панель, задняя стенка ящика(410*120)	12
9	Боковые стенки ящика (450*120)	12
10	Дно ящика ДВПО (440*448)	6
11	Ручка	6
13	Стяжка эксцентриковая	4
14	Стяжка винтовая (евровинт)	34
15	Подпятники	4
16	Винт М 4*35	12
18	Саморез 3,5*16	48
19	Направляющие роликовые L400, комплект	6
20	Гвозди 1*20	90
21	Заглушка малая	10
22	Ключ шестигранный	1
23	Паспорт	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется молоток, крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

- 4.1. Распаковать компоненты шкафа.
- 4.2. При помощи ключа 21 винтовыми стяжками 14 соединить боковые стенки 1 с дном 3, средней панелью 4 и цоколем 6.
- 4.3. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 19 к боковым стенкам 1.
- 4.4. При помощи эксцентриковых стяжек 13 соединить крышу 2 с боковыми стенками 1.
- 4.5. Положить без перекоса подсобранный каркас шкафа на ровную поверхность лицевой стороной вниз.
- 4.6. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить заднюю стенку 5 к задней поверхности каркаса шкафа.
- 4.7. Установить подпятники, отступая от края 20 мм.
- 4.8. Собираем ящик. При помощи ключа 21 и винтовых стяжек 14 соединить боковые стенки ящика 9 с задней стенкой и фальш-панелью ящика 8. Закрепить фасады ящиков.
- 4.9. Поставить шкаф в исходное положение. Закрепить ручки на фасадах. Установить ящики в каркас шкафа.
- 4.10. При помощи отвертки отрегулировать фасады. Установить заглушки.

