

СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
СПп-01-«МСК» (МСК-5501), СПп-02-«МСК» (МСК-5502), СПп-03-«МСК» (МСК-5504)
ТУ 9452-004-52962725-2001

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Столики процедурные передвижные (далее по тексту — столики) предназначены для оснащения стоматологических, смотровых процедурных кабинетов больниц и поликлиник.
 1.2 Столики изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры и размеры.
 2.1.1. Основные параметры и размеры столиков указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров		
	СПп-01-«МСК»	СПп-02-«МСК»	СПп-03-«МСК»
Габаритные размеры каркаса, мм, ±5 мм	640x420x790	640x420x790	800x500x770
Высота столика с колесами, мм, ±5 мм	860	860	905
Габаритные размеры с колесами, мм, ±5 мм	690x440x860	690x440x860	905x500x905
Масса, кг не более	16	20	24
Количество полок, шт.	2	3	2

2.2. Характеристики:

- 2.2.1. Столик выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 50 кг.
 2.2.2. Столик СПп-01-«МСК», СПп-02-«МСК» установлен на 4 колеса, диаметром 50 мм, вращающихся вокруг вертикальной оси. Столик СПп-03-«МСК» установлен на 4 колеса, диаметром 100 мм, вращающихся вокруг вертикальной оси. Столики СПп-01-«МСК», СПп-02-«МСК» и СПп-03-«МСК» имеют два колеса, оснащенных тормозом, и два колеса без тормоза.
 2.2.3. Усилие, необходимое для перемещения столика с номинальной нагрузкой не более 100 Н (10 кг), при этом колеса столиков должны быть ориентированы в направлении движения.
 2.2.4. Столики при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и обладают виброустойчивостью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444.
 2.2.5. Поверхность столика устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ГОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.
 2.2.6. Столики при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения УХЛ 4.2.
 2.2.7. Столики, упакованные в транспортную тару, сохраняют работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444.
 2.2.8. Средний срок службы столика до списания не менее 6 лет.
 За критерий предельного состояния столика принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Комплект поставки столика соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

Комплекующие	Количество, шт.		
	СПп-01- «МСК»	СПп-02- «МСК»	СПп-03- «МСК»
1. Дуга	1	1	Цельно-сварная конструкция
2. Стойка	2	2	
3. Полка	2	3	
4. Винт М6х35 полукр.гол.	8	12	
5. Гайка М6	8	12	
6. Шайба 6 пружинная	8	12	
7. Колесо диаметром 50 мм с тормозом	2	2	-
8. Колесо диаметром 50 мм без тормоза	2	2	-
9. Колесо диаметром 100 мм с тормозом	-	-	2
10. Колесо диаметром 100 мм без тормоза	-	-	2
11. Винт М10х30	4	4	4
12. Шайба 10 пружинная	4	4	4
13. Паспорт	1	1	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. В зависимости от модели столик состоит из:
 - каркаса;
 - двух полок (модели СПп-01-«МСК», СПп-03-«МСК»);
 - трех полок (модель СПп-02-«МСК»);
 4.2. Каркас столиков изготовлен из нержавеющей стальной трубы.
 4.3. Полки из нержавеющей стальной листовой толщиной 0,8 мм и 1,5 мм.
 4.4. Столик СПп-03- «МСК» имеет ограждения, изготовленные из нержавеющей трубы круглого сечения и приваренные к каркасу.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. К сборке и эксплуатации столиков допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию столика и правила эксплуатации.
 5.2. Перемещение столика производить только с отключенным тормозом колес.

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1. После транспортирования столика в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
 6.2. Распаковать столик и проверить целостность покрытия и целостность полок.
 6.4. Снять защитную пленку с полок, остатки клея после пленки удаляются дезинфицирующим средством Лизоформин 3000. Применять только в разбавленном виде! Работать в защитных перчатках.
 6.3. Проверить комплектность.
 6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
 7.2. Осуществить сборку согласно инструкции.
 7.3. Перед началом эксплуатации проверьте крепление колес.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1. Техническое обслуживание включает в себя ежедневный осмотр целостности покрытий и столика и надежность крепления его элементов.
 8.2. Особое внимание необходимо обращать на надежность крепления колес. Периодически, не реже 1 раза в месяц, прочищать их от грязи, производить смазку подшипников и затяжку винтов.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1. Столики в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C..
 9.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
 10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода столика в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
 10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столики процедурные передвижные СПп-01-«МСК», СПп-02-«МСК», СПп-03-«МСК» _____

Дата выпуска _____

Соответствуют техническим условиям ТУ 9452-004-52962725-2001 и признаны годными к эксплуатации.

Подписи лиц, ответственных за приемку. _____

М. П.

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие медицинской техники _____ на ремонт (замену) в течение гарантийного срока


наименование и тип изделия _____

номер ГОСТ или ТУ _____


Инструкция по сборке столика процедурного передвижного

1. Прикрепить полки к дуге и стойкам при помощи винтов М6х35, гаек и шайб. Сборку производить с верхней рамки.
2. Прикрепить колеса к дуге и стойкам при помощи винтов М10х30 и шайб 10 пружинных.
Для более надежной фиксации резьбы рекомендуем винты посадить на краску.
3. Установить полки.

МСК-5501

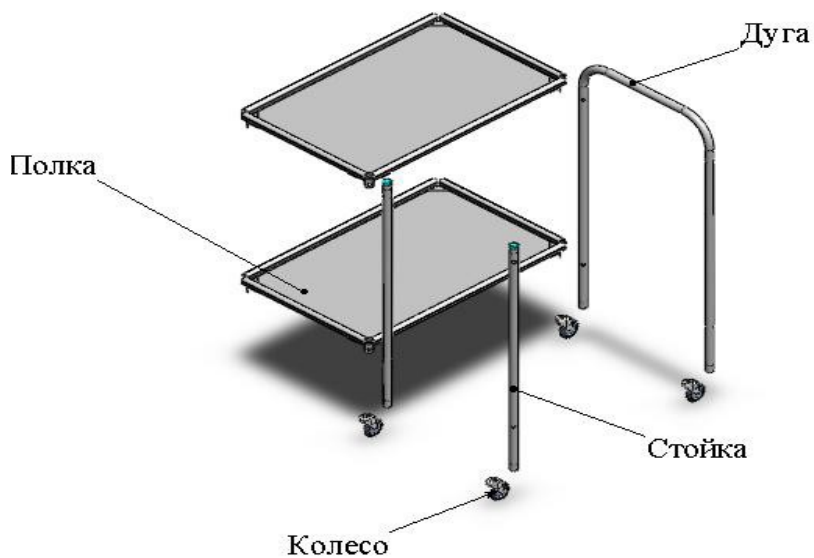

МСК-5502

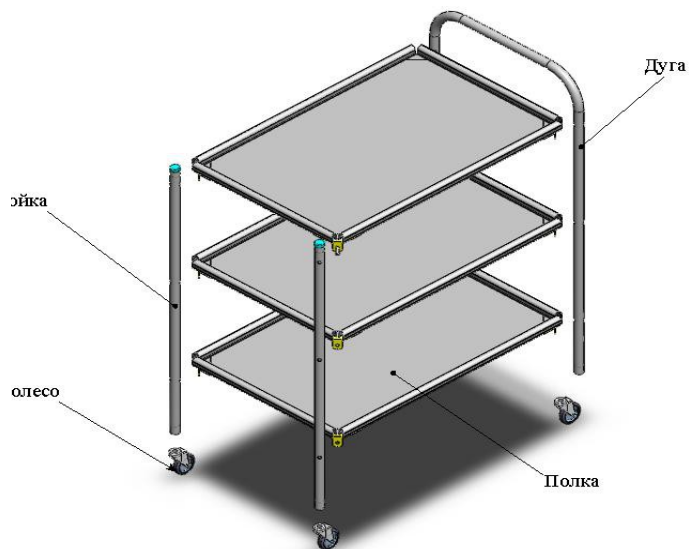

МСК-5504

