

## 5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35 °С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

## 6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

## 7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск  
Ул. Студенческая д.30 офис 121  
**ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»**  
Тел./факс (8313)25-35-78  
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:


Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковщик \_\_\_\_\_

# Паспорт

## Стол пеленальный

### СП 1/01

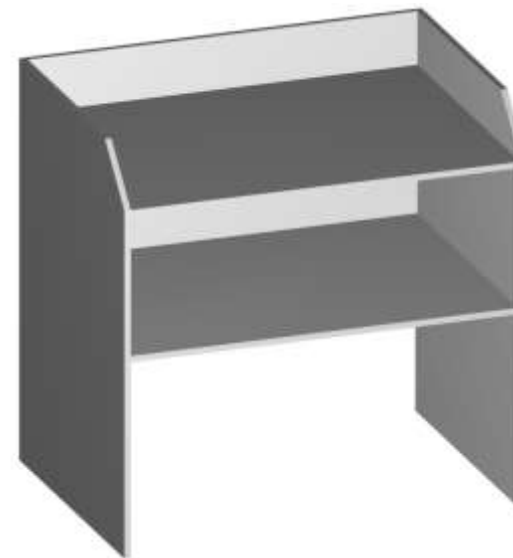

**РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская**

**по ТУ 5620-001-36725405-2015**

г. Дзержинск.

## 1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Стол предназначен для организации стоячего рабочего места и хранения сухих предметов внутри стола.
- 1.2. Стол изготовлен из ламинированного ДСП.

## 2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
1000	1010	720	60

## 3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Столешница (980*704)	1
3	Полка (980*704)	1
4	Стенка боковая (1000*720)	2
5	Стенка задняя (980*530)	1
8	Гвозди	8
11	Винтовая стяжка (Ø7x50)	16
12	Ключ винтовой стяжки	1
13	Заглушка винтовой стяжки	16
14	Подпятник	4
15	Упаковка	1
16	Паспорт	1

**Внимание!:** Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

## 4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и ключ для винтовых стяжек (входит в комплект). Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.

- 4.1. Распаковать компоненты стола.
- 4.2. При помощи ключа 12 винтовыми стяжками 11 соединить заднюю стенку 5 с боковыми панелями 4, полкой 3 и столешницей 1.
- 4.3. Установить подпятники 14 на нижние торцы боковых панелей 4 на расстоянии 20 мм от углов соответствующей панели.
- 4.4. Установить заглушки 13 на головки винтовых стяжек 11.

