

**СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ СМ-1 "ДЗМО"
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
СМ-1.00.00 ПС**



ООО Торговый Дом "Аверс"

Акционерное общество
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001,
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
 Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед регулировкой и эксплуатацией.
 Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Стул медицинский СМ-1 "ДЗМО" предназначен для оснащения медицинских кабинетов. Стул изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 15150 в соответствии с требованиями ТУ 9452-060-07614107-2012.

2. Технические характеристики

Таблица 1

| | |
|--|-------------|
| Диаметр сиденья | 360 ± 50 мм |
| Высота сиденья над полом: | |
| - минимальная | 470 ± 50 мм |
| - максимальная | 600 ± 50 мм |
| Масса, не более | 12 кг* |
| Предельная рабочая нагрузка на табурет, не более | 130 кг |
| Средний срок службы, не менее | 5 лет |
| * Фактическая масса | 7,4 кг |

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Количество, штук |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | Стул медицинский СМ-1 "ДЗМО" | 1 |
| Эксплуатационная документация | | |
| 2 | Руководство по эксплуатации (паспорт) | 1 |

Примечание:

При поставке стула в разобранном виде крепежные изделия поставляются установленными в местах их креплений или уложенными в пакет.

3.1. Перечень дополнительных съёмных частей приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Количество, штук |
|-------|-------------------|------------------|
| 1 | Подставка для ног | 1 |

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

- 4.1. Стул согласно изображению на обложке настоящего руководства по эксплуатации (паспорта) состоит из пятилучевого основания с опорой для ног на самоориентирующихся колесах, газ-лифта для регулировки высоты, сиденья и спинки, обтянутых винилскожей, опорной дуги спинки в защитном гофрированном чехле.
- 4.2. Для подготовки к работе, распакуйте стул и очистите от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку притиранием насухо тампоном из марли, смаченным спиртом, проведите техническое обслуживание согласно раздела 5. Выполните санитарную обработку стула.
- 4.3. В случае поставки стула в разобранном виде проведите его сборку следующим образом:

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество "Доческинский завод медицинского оборудования"

наименование организации или фирмы, имя, отчество индивидуального предпринимателя, прикладывая декларацию о соответствии
 зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Нижегородской области, дата
 регистрации 21.10.2002, ОГРН: 1025201635205

свидетель о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
 Адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Доческое, Промышленный
 №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, Фактический адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская
 область, город Выкса, Рабочий поселок Доческое, Промышленный №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001,
 телефон: +78317748062, факс: +78317748062

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Кострова Андрея Владимировича

(наименование, имя, отчество руководителя организации, от имени которой приносится декларация)

заявляет, что Тумбочки прикроватные ПП и ПП-1 по ТУ 9452-023-07614107-2005,
 Штанги для диванов инфузионных клизм на трех опорах ШВ-«ДЗМО» по ТУ 9452-004-07614107-99; Шерма одно-
 трехсекционная с полимерными полотнонами, для кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений ШП 1/3-«ДЗМО»
 по ТУ 9452-007-07614107-99; Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов по ТУ 9452-060-07614107-2012 (состав:
 подставка для тазов, ПТ-«ДЗМО»; подставка для стерилизационных коробов (биксов), ПСК-«ДЗМО»; столик для забора крови,
 СВК-«ДЗМО»; стул медицинский, СМ-1 «ДЗМО»; табурет медицинский, ТМ-1 «ДЗМО»). Принадлежности: подставка для ног,
 тазовая пружина;

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

Серийный выпуск, Код ОКП 945210

свидетель о серийном выпуске или партии (номер партии, номер модели, реквизиты документа (сертификат), выданный код ОК 005-05 в форме ТН ФЭД ТС или ОК 802-93 (ОКС/ОТ))

Изготовитель: Акционерное общество "Доческинский завод медицинского оборудования", Адрес: 607033, Российская
 Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Доческое, Промышленный №19, участок «ДЗМО», здание
 №1, помещение №001, Фактический адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий
 поселок Доческое, Промышленный №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, телефон: +78317748062, факс:
 +78317748062

в наименовании изготовителя, страны и т.д.

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4)

(обозначение соответствия документа, соответствие которому подтверждено)

данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, описанных требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003) Рег. № СДСГК RU.OC06.X00210 от 03.12.2015 года, выдан Обществом с ограниченной
 ответственностью "ЛАНТА ЦЕНТР" (Свидетельство Рег. № РОСС RU.3608.041D000 от 02.11.2015 года, выдано Федеральным
 агентством по техническому регулированию и метрологии), адрес: 107589, город Москва, улица Красноварская, дом 17.
 Регистрационное удостоверение №№ ФСР 2010.06821 от 12.11.2015 года, № ФСР 2012/13173 от 12.11.2015 года, ФСР
 2012/13172 от 12.11.2015 года, ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 года, выданные Федеральной службой по надзору в сфере
 здравоохранения (РОСДРАИНАДЗОР)

(информация о документах, подтверждающих соответствие)

для приношения декларации

дата подписания декларации 11.12.2015

дата вступления в силу декларации 10.12.2018

М.П.

Костров Андрей Владимирович

(подпись, фамилия)

Свидетель о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер РОСС RU.0001.11M005.011-15-001011 продукция ООО "ПромТест"

(наименование субъекта, дата регистрации, номер, регистрационный код декларации)

адрес: 117279, Москва, ул. Профсоюзная, 93А

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU.0001.11M005.011-15-001011

дата регистрации в регистрирующем органе

М.П.

Савинский Александр Сергеевич

(подпись, фамилия, фамилия, отчество, дата регистрации)



- 4.3.1. Вкрутите до упора в пучину основания самоориентирующиеся колёса.
- 4.3.2. Установите газ-лифт в основание.
- 4.3.3. Вставьте опорную дугу в защитный гофрированный чехол, плоской частью чехла в сторону спинки.
- 4.3.4. Закрепите спинку к опорной дуге через кронштейн со скобой спинки, используя по 2 шт. - Винт М6 х 25, Шайба А.6.
Спинка должна качаться свободно на опорной дуге.
- 4.3.5. Вставьте опорную дугу в защитном гофрированном чехле в сборе со спинкой в основание с нажимной ручкой и закрепить зажимным винтом.
- 4.3.6. Закрепите к сиденью основание с нажимной ручкой в сборе со спинкой, используя по 4 шт. - Винт М6 х 16, Шайба 6.65Г, Шайба А.6.
- 4.3.7. Установите на газ-лифт сиденье в сборе со спинкой в отверстие основания с нажимной ручкой.
- 4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- 4.4.1. Эксплуатация неисправного стула. Во избежание падения, не вставайте на сиденье и не используйте не по прямому назначению.
- 4.4.2. Самостоятельный ремонт стула неуполномоченными заводом-изготовителем лицами.
- 4.4.3. Препятствовать свободному перемещению подвижных механизмов стула во избежание получения травм и увечий.

5. Техническое обслуживание

- 5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений; замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных; смазке подшипников, включая горизонтальную и вертикальную оси колёс, любой консистентной технической смазкой; промывке моющими растворами и санитарной обработке стула.
- 5.2. Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования стула, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего руководства по эксплуатации (паспорта), при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надёжность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колёс, надёжность фиксации газ-лифта в любом положении.
- 5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6. Консервация

- 6.1. Металлические детали стула должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°С со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01438-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).
- 6.2. Стул медицинский ММ-1 "ДЗМО" подвергнут в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-060-07614107-2012.

| Дата | Наименование работы | Срок действия, лет | Должность, фамилия, подпись |
|------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Консервация | 3 | |

7. Транспортирование и хранение

- 7.1. Транспортирование стула должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
- 7.2. Стул должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.
Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Сведения об утилизации

Поскольку стул не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
- 9.2. Гарантийный срок 24 месяца при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-060-07614107-2012.
- 9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
- 9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации и товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
- 10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельства выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.



Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 или 24 месяца при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.

Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

| Стул медицинский | СМ-1 "ДЗМО" | |
|--|-------------|---|
| Наименование изделия | Обозначение | |
| изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. | | |
| Служба качества | ┌ | └ |
| _____ | | |
| подпись | | |
| _____ | | |
| расшифровка подписи | | |
| _____ | | |
| число, месяц, год | ┌ | └ |
| | ┌ | └ |
| Сборщик / упаковщик | | |
| | ┌ | └ |

ООО Торговый Дом "Аверс"



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

| | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|--|
| Наименование товара | СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ СМ-1 "ДЗМО" | | |
| Серийный номер | | Дата производства | |
| Гарантийный срок | 24 месяца | со дня продажи | |

Заполняет продающая организация

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Наименование продающей организации | |  <p>м.п.</p> |
| Дата продажи | | |
| ФИО / Подпись | | |

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
К комплектации и внешнему виду
товара претензий не имею.

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Наименование покупателя | |  <p>м.п.</p> |
| ФИО / Подпись | | |

