

ООО Торговый Дом "Аверс"

**ТАБУРЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ТМ-1 "ДЗМО"
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
ТМ-1.00.00 ПС**



Акционерное общество
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001,
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед регулировкой и эксплуатацией. Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Табурет медицинский ТМ-1 «ДЗМО» предназначен для оснащения медицинских кабинетов. Табурет изготавливают в лимитированном исполнении и УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 15150 в соответствии с требованиями ТУ 9452-060-07614107-2012.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Диаметр сиденья	360 ± 50 мм
Высота сиденья над полом:	
- минимальная	470 ± 50 мм
- максимальная	600 ± 50 мм
Масса	7,5 кг
Предельная рабочая нагрузка на табурет, не более	130 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Табурет медицинский ТМ-1 «ДЗМО»	1
Эксплуатационная документация		
2	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

Примечание:

При поставке табурета в разобранном виде крепежные изделия поставляются установленными в местах их креплений или уложенными в пакет.

3.1. Перечень дополнительных съёмных частей приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Подставка для ног	1

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

- 4.1. Табурет согласно изображению на обложке настоящего руководства по эксплуатации (паспорта) состоит из пятилучевого основания с опорой для ног на самоориентирующихся колесах, газ-лифта для регулировки высоты, сиденья, обтянутого винилискожей.
- 4.2. Для подготовки к работе, распакуйте табурет и очистите от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку притиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, проведите техническое обслуживание согласно раздела 5. Выполните санитарную обработку табурета.
- 4.3. В случае поставки табурета в разобранном виде проведите его сборку следующим образом:
 - 4.3.1. Вкрутите до упора в лучи ну основания самоориентирующиеся колёса.
 - 4.3.2. Установите газ-лифт в основание.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество "Дзюджинский завод медицинского оборудования"
 (наименование организации или фирмы, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование декларации о соответствии)
 (зарегистрировано) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Нижегородской области, дата
 регистрации 21.10.2002, ОГРН: 1025201635205

(наименование организации или индивидуального предпринимателя (наименование зарегистрированного лица, дата регистрации, регистрационный номер)
 Адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Дзюджин, Проминтеррайон
 №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, Фактический адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская
 область, город Выкса, Рабочий поселок Дзюджин, Проминтеррайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001,
 телефон: +78317748062, факс: +78317748062

адрес, телефон, факс

я лице Генерального директора Кострова Андрея Владимировича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Табурет медицинские ТМ-1 и ТМ-1 по ТУ 9452-023-07614107-2005;

Платы для диванных инфузионных краниев на трех опорах ПИВ-«ДЗМО» по ТУ 9452-004-07614107-99; Шарнир одно-
 трехсекционный с полимерными полостями, для кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений ШП 1/3-«ДЗМО»
 по ТУ 9452-007-07614107-99; Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов по ТУ 9452-060-07614107-2012 (состав:
 подставка для тазов, ПТ-«ДЗМО»; подставка для стерилизационных коробов (бюксов), ПСК-«ДЗМО»; столик для забора крови,
 СВЗ-«ДЗМО»; стул медицинский, СМ-1 «ДЗМО»; табурет медицинский, ТМ-1 «ДЗМО»). Прямые/косвенные: подставка для ног,
 газовая трубка;

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

Серийный выпуск, Код ОКСТ 945210

(наименование, код ОКСТ, код ОКСТ 10, код ОКСТ 11, код ОКСТ 12, код ОКСТ 13, код ОКСТ 14, код ОКСТ 15, код ОКСТ 16, код ОКСТ 17, код ОКСТ 18, код ОКСТ 19, код ОКСТ 20, код ОКСТ 21, код ОКСТ 22, код ОКСТ 23, код ОКСТ 24, код ОКСТ 25, код ОКСТ 26, код ОКСТ 27, код ОКСТ 28, код ОКСТ 29, код ОКСТ 30, код ОКСТ 31, код ОКСТ 32, код ОКСТ 33, код ОКСТ 34, код ОКСТ 35, код ОКСТ 36, код ОКСТ 37, код ОКСТ 38, код ОКСТ 39, код ОКСТ 40, код ОКСТ 41, код ОКСТ 42, код ОКСТ 43, код ОКСТ 44, код ОКСТ 45, код ОКСТ 46, код ОКСТ 47, код ОКСТ 48, код ОКСТ 49, код ОКСТ 50, код ОКСТ 51, код ОКСТ 52, код ОКСТ 53, код ОКСТ 54, код ОКСТ 55, код ОКСТ 56, код ОКСТ 57, код ОКСТ 58, код ОКСТ 59, код ОКСТ 60, код ОКСТ 61, код ОКСТ 62, код ОКСТ 63, код ОКСТ 64, код ОКСТ 65, код ОКСТ 66, код ОКСТ 67, код ОКСТ 68, код ОКСТ 69, код ОКСТ 70, код ОКСТ 71, код ОКСТ 72, код ОКСТ 73, код ОКСТ 74, код ОКСТ 75, код ОКСТ 76, код ОКСТ 77, код ОКСТ 78, код ОКСТ 79, код ОКСТ 80, код ОКСТ 81, код ОКСТ 82, код ОКСТ 83, код ОКСТ 84, код ОКСТ 85, код ОКСТ 86, код ОКСТ 87, код ОКСТ 88, код ОКСТ 89, код ОКСТ 90, код ОКСТ 91, код ОКСТ 92, код ОКСТ 93, код ОКСТ 94, код ОКСТ 95, код ОКСТ 96, код ОКСТ 97, код ОКСТ 98, код ОКСТ 99, код ОКСТ 100)

Изготовитель: Акционерное общество "Дзюджинский завод медицинского оборудования", Адрес: 607033, Российская
 Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Дзюджин, Проминтеррайон №19, участок «ДЗМО», здание
 №1, помещение №001, Фактический адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий
 поселок Дзюджин, Проминтеррайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, телефон: +78317748062, факс:
 +78317748062

(наименование изготовителя, страна и т.д.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4)

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено)

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)

Декларация принята на основании: Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-
 2011 (ISO 13485:2003) Рег. № СДСГК ВУ ОС06.500210 от 03.12.2015 года, выдан Обществом с ограниченной
 ответственностью "ЛАНТА ЦЕНТР" (Смольнинский Рег. № РОСС RU.3608.04ЦК09 от 02.11.2015 года, выдан Федеральным
 агентством по техническому регулированию и метрологии), адрес: 107589, город Москва, улица Краснозарская, дом 17.
 Регистрационные удостоверения №№ ФСР 2010.06821 от 12.11.2015 года, № ФСР 2012/13171 от 12.11.2015 года, ФСР
 2012/13172 от 12.11.2015 года, ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 года, выданные Федеральной службой по надзору в сфере
 здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

(информация о документах, подтверждающих соответствие)

для принятия декларации)

Дата подготовки декларации 11.12.2015

Декларация действительна до 10.12.2018

Александр Сергеевич
 (подпись)

Костров Андрей Владимирович

(информация, фамилия)

Сделана в регистрации декларации о соответствии
 Регистрационный номер РОСС RU.0001.11МН08.001 по сертификации продукции ООО "ПромТест"

(наименование и адрес, дата выпуска декларации, регистрационный номер декларации)

адрес: 112279, Москва, ул. Профсоюзная, 93А, оф. 42

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU.МН08.001691, от 11.12.2015

М.П. (подпись и печать) (информация, фамилия)

Татьяна Осиповна, заместитель руководителя с

правом подписи - Евдоким Александр Сергеевич

(подпись, наименование организации, дата и место оформления)



4.3.3. Основание с нажимной рукояткой закрепите к сиденью, используя по 4 штуки - Винт М6 х 16, Шайба 6.65Г, Шайба А.6.

4.3.4. Установите на газ-лифт сиденье в отверстие основания с нажимной рукояткой.

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.4.1. Эксплуатация неисправного табурета. Во избежание падения, не вставляйте на сиденье и не используйте не по прямому назначению.

4.4.2. Самостоятельный ремонт табурета неуполномоченными заводом-изготовителем лицами.

4.4.3. Препятствовать свободному перемещению подвижных механизмов табурета во избежание получения травм и увечий.

5. Техническое обслуживание

5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (проводится раз в полгода) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений; замене, при необходимости, годными деталями поломанных или изношенных; смазке подшипников, включая горизонтальную и вертикальную оси колёс, любой консистентной технической смазкой; промывке моющими растворами и санитарной обработке табурета.

5.2. Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования табурета, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего руководства по эксплуатации (паспорта), при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колёс, надежность фиксации газ-лифта в любом положении.

5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6. Консервация

6.1. Металлические детали табурета должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°С со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

6.2. Табурет медицинский ТМ-1 "ДЗМО" подвергнут в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-060-07614107-2012.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Транспортировка и хранение

7.1. Транспортировка табурета должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

7.2. Табурет должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80% при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Сведения об утилизации

Поскольку табурет не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.

9.2. Гарантийный срок 24 месяца при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-060-07614107-2012.

9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.

9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
- 10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

Табулет медицинский	TM-1 "ДЗМО"	
наименование изделия	Обозначение	
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.		
Служба качества		

подпись		

расшифровка подписи		

число, месяц, год		



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 12 ноября 2015 года № ФСП 2012/14093

На медицинское изделие
Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов
по ТУ 9452-060-07614107-2012

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок "ДЗМО", здание №1, пом. №001

Производитель
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок "ДЗМО", здание №1, пом. №001

Место производства медицинского изделия
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

Номер регистрационного досье № РД-9158/44315 от 06.11.2015

Вид медицинского изделия 156900

Класс потенциально вредных применений медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5210

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 11 ноября 2015 года № 8429
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Вруководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.В. Пархоменко

0015806

Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 или 24 месяца при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.

Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

ООО Торговый Дом



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование товара	ТАБУРЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ТМ-1 "ДЗМО"		
Серийный номер		Дата производства	
Гарантийный срок	24 месяца	со дня продажи	

Заполняет продающая организация

Наименование продающей организации		
Дата продажи		
ФИО / Подпись		

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
К комплектации и внешнему виду товара претензий не имею.

Наименование покупателя		
ФИО / Подпись		

