

Косметологическое кресло



К-01

Косметологическое кресло К-01

1. Технические характеристики

- 1.1. Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) 1250, 600, 1500 мм.
- 1.2. Допускаемая нагрузка (не более): 140 кг на сиденье; 60 кг на спинку; 20 кг на ноги;
- 1.3. Масса изделия 26 кг.
- 1.4. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд, пластик.
- 1.5. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 60-70%.
- 1.6. Срок службы изделия - 5 лет.

2. Комплектация


Обозначение	Наименование детали	Кол-во шт.	Примечание
<u>Каркасные детали</u>			
К 1	Стойка боковая	2	
К 2	Траверса	1	
К 3	Ригель	2	
К 4	Ось фиксирующей планки (хром)	2	
К 5	Планка фиксирующая	2	
К 6	Шток узла наклона спинки (длинный)	1	В сборе с пластиной опорной
К 7	Шток узла наклона подножки (короткий)	1	В сборе с пластиной опорной
Крепежные изделия			
К11	Болт М8х30	12	
К12	Опора регулируемая	4	
К13	Петля фигурная	2	
К14	Петля прямая	2	
К15	Винт М6х16 с пресс-шайбой	8	
К16	Винт М6х16	8	Под петли фигурные К13
К17	Винт М6х35	4	Под сиденье
К18	Саморез 5х20	8	Под петли прямые К14
К19	Винт М6х12	2	
<u>Мягкие элементы</u>			
К 8	Сиденье	1	
К 9	Спинка	1	
К10	Подушка под ноги	1	

3. Порядок сборки

- 3.1. Распаковать изделие, проверить комплектность; подготовить инструмент: ключи гаечные S=13;17 мм, отвертка крестовая №2 или 3, шило диаметром 2-3,5 мм.
- 3.2. Ввернуть в боковые стойки К 1 опоры К12.
- 3.3. Надеть на оси К4 фиксирующие планки К 5.
- 3.4. Скрепить боковые стойки с траверсой К 2 с помощью болтов К11. Болты не затягивать.
- 3.5. Установить и закрепить на каркасе болтами К11 ригели К3. Болты не затягивать.
- 3.6. Установить каркас на ровную поверхность, убедиться в отсутствии грубых перекосов; затянуть болты крепления каркаса гаечным ключом.
- 3.7. Соединить мягкие элементы кресла: сиденье, спинку и подушку под ноги между собой при помощи петель, учитывая, что спинка крепится к сиденью двумя

фигурными петлями К13 винтами К16, а подушка под ноги прямыми петлями К14 саморезами К18 по разметке.

- 3.8. Прикрепить к спинке (большой элемент) и подушке для ног штоки узлов наклона К 6 (длинный, для спинки) и К7 (короткий, для подушки) с помощью винтов К15.

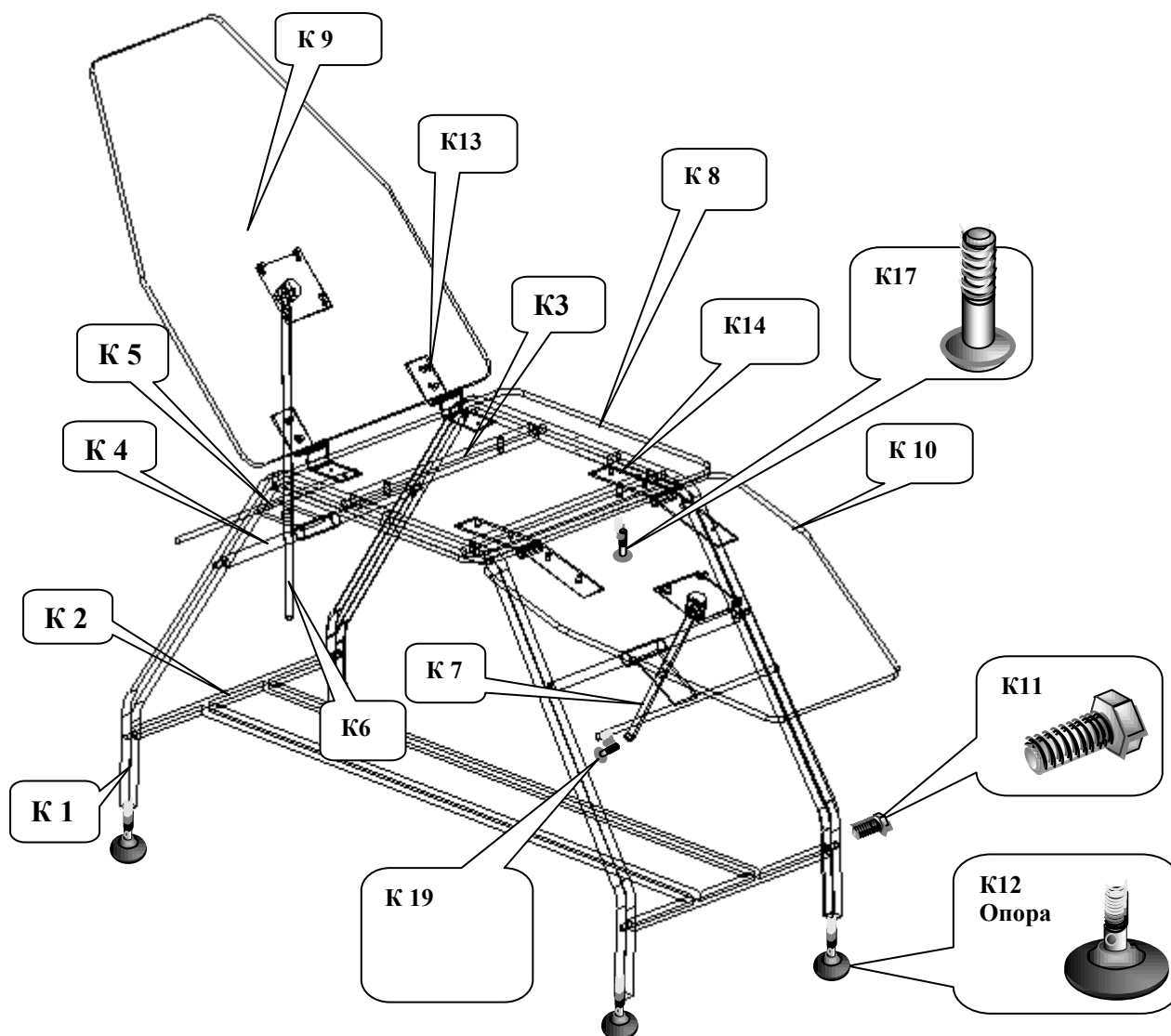

3.9. Установить мягкие элементы на каркас. Закрепить сиденье на каркасе винтами К17.

3.10. Установить оси К 4 с надетыми на них фиксирующими планками, предварительно вставив в отверстия планок соответствующие штоки узлов наклона и фиксации, и закрепить на каркасе с помощью болтов К11. В случае затруднения с установкой осей в каркас, необходимо отпустить болты крепления стоек с траверсой. После установки осей затянуть все болты ключом.

3.11. Ввернуть в торец штока К 6 и К7 узлов наклона спинки винт К19.

3.12. Изменение угла наклона спинки осуществляется с помощью узла наклона следующим образом: -поднимаем спинку до необходимого уровня, затем, придерживая спинку, опускаем планку К 5 вниз до упора, после чего шток К 6 узла наклона плотно застопорится.

4 Меры безопасности.

Использовать кресло только по прямому назначению, не допуская превышение нагрузок указанных в пункте 1.2

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

5.2. На механические повреждения мягких элементов кресел полученные в процессе эксплуатации (порезы, потёртости, царапины, пятна от воздействия агрессивных химических веществ) данная гарантия не распространяется.

5.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.

5.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с подписью продавца, печатью торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-транспортную накладную.

5.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу:

г. Москва, ул. Электровзаводская д.29, стр. 2, офис 407Г инд: 107076, тел: (495) 642-86-62 , (495) 988-76-60 email: service@group-hitek.ru

6. Примечания.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.

СБОРКА				ОТК	УПАКОВКА				ПРИМЕЧАНИЕ
20	21	14	22		9	10	11	12	
3	4	5 √	6		13				
7	8				√				

Дата изготовления _____

№ П/П _____

Дата продажи
М.П.

Подпись продавца

Изготовлено в России ООО «Хитэк Групп»

107076, Россия, г. Москва, ул. Электровзаводская, д. 29, стр. 2

+7 (495) 223-03-41