



## ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10  
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,  
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"  
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555  
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53  
<http://www.med-mos.ru> e-mail:[info@med-mos.ru](mailto:info@med-mos.ru)

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

#### Стол массажные переносные и стационарные с принадлежностями

JF-Madvanta

Номер партии: 0502001-7/15

*КО-162*

Поздравляем Вас с приобретением нового портативного массажного стола. Ваш новый стол был изготовлен в соответствии со всеми строгими стандартами и с использованием высокого качества компонентов и материалов. При правильном использовании, как описано в настоящем руководстве, Ваш стол прослужит Вам долго. Для обеспечения правильности использования Вашего стола, пожалуйста, уделите время для изучения настоящей инструкции перед его использованием.

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ




1. Периодически совершайте проверку изделия на исправность. Убедитесь, что все винты находятся в безопасном положении, кабель не изломан и не изношен. Убедитесь в отсутствии повреждений или трещин в деревянной конструкции.
2. Не перегружайте стол сверх его весового лимита. Это может привести к травмированию пользователя.
3. Не используйте спиртосодержащие моющие средства при уходе за изделием из винила. Это может повредить винил. Используйте слегка мыльную воду, затем необходимо вытереть изделие насухо.
4. При использовании, убедитесь, что все ножки стола находятся на одном уровне. Использование такого стола может привести к его неустойчивости и последующей травме пользователя.

#### УСТАНОВКА СТОЛА

1. Откройте коробку, и выньте все аксессуары из нее.
2. Снимите все упаковочный материал с аксессуаров.
3. Достаньте массажный стол с металлическим каркасом, положите ножками вверх.
4. Установите ножки, вкручивая каждую до металлического основания стола. Полностью раскройте стол.
5. Затем переверните стол и установите на ножки, зафиксируйте все металлические детали

в каждом углу стола, как это показано на картинке.

6. Установите все регулируемые детали так, как это показано на картинке ① внутри отверстий, как на картинке ②
7. Установите подлокотники с обеих сторон стола.

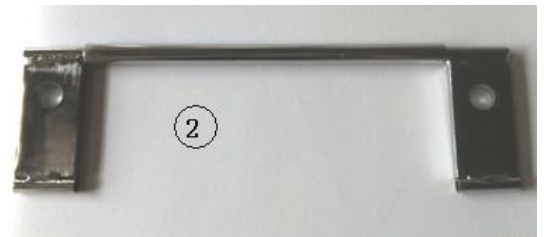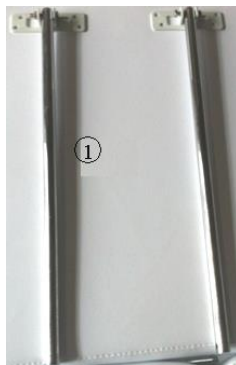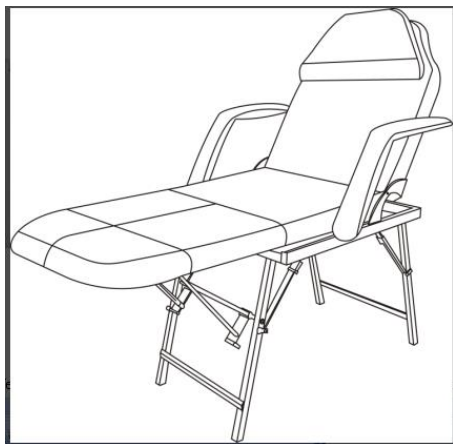

Использование стола и аксессуаров

Мы предоставляем дополнительные аксессуары для Вас. Пожалуйста, прочтите инструкцию полностью, перед началом использования.

**Подголовник:**

Конструкция подголовника в виде полумесяца сделает процедуру наиболее комфортной для клиента. Отрегулировать подголовник достаточно просто. Регулировка проводится с помощью ручки

**Боковая ручка расширения:**

Это Боковая ручка расширения для нашего стола. Эти съемные, мягкие боковые подлокотники добавляют ширины для нашего стола. Они вписываются в отверстия в каждой стороне стола. Это дает комфортную поддержку рук для более полных клиентов (см. рисунок на первой странице).

**Регулировка высоты:**

Высота данного стола 75 см. Она неизменна.

**Регулировка спинки:**

Разомкните ремни регулируемой спинки. Регулятор высоты спинки легко меняет угол спинки. Надавите на спинку перед использованием, чтобы убедиться, что позиция закреплена. Чтобы разложить спинку, поднимите ее вверх до максимума и опустите вниз

**Максимально допустимый вес стола:**

Расположите клиента в центре стола, это поможет распределить вес равномерно и обеспечить стабильность стола. В первый раз сядьте рядом с центром (не в центр) стола, затем сядьте ближе к центру (от края) насколько это возможно. Рабочий вес-это вес клиента и общее давление терапевта. Например: вес клиента 135 кг., а максимальный рабочий вес стола 225 кг. Таким образом, максимальное давление терапевта не должно превышать 90 кг. Угловое давление не должно превышать 50 % всего рабочего веса.

**НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ НА СТОЛ** (Превышение максимально допустимой нагрузки на стол может привести к серьезным травмам или повреждениям).

Хранение:

Прикрепите подголовник под эластичный ремень, как показано на картинке. Прикрепите все аксессуары в их исходное положение (рис. 7).

Переносная сумка должна использоваться при транспортировке стола, для защиты его от повреждений. Когда стол не используется, храните его в прохладном сухом помещении без попадания прямых солнечных лучей. Не подвергайте стол сильным перепадам температур (холод или жара) или влажности.

#### Уход за столом

Уход за обивкой стола

Ежедневная чистка: ежедневно удаляйте грязь с поверхности стола теплой водой с мыльным раствором, насухо протрите мягкой тканью без ворса.

Дезинфекция: Проводите дезинфекцию стола, по мере необходимости, средствами, содержащими изопропанол (предназначено для использования виниловых поверхностей).

Удаление пятен: Некоторые незначительные пятна могут быть удалены мягкими небразивными очистителями. После удаления пятна, смочите мягкую ткань без ворса теплой водой и насухо вытрите. Более стойкие пятна могут потребовать профессиональную чистку.

На заметку: Никогда не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства для чистки стола. Это может привести к повреждению обивки. Избегайте использования каких-либо защитных средств, они могут повредить винил.

Уход за деревом:

Ваш массажный стол был изготовлен из высококачественных пород лиственных деревьев и покрыт лаком, что не потребует особенного ухода. При желании, стол можно отполировать. Держите стол в сухости и избегайте воздействие влажной среды. При намокании, очень быстро насухо вытрите мягкой тканью.

Характеристика		
Количество секций		5
Размеры секций (см)	1.	Спинка 70*61см
	2.	Тазобедренная секция 50*61 см
	3.	Ножная секция 37*30 см
	4.	Икроножная секция 30*22 см
	5.	Подлокотники 71x10 см
	6.	
Высота стола		75 см
Регулировка угла спинной секции		90 градусов
Регулировка угла ножной секции		85 градусов
Материал поверхности стола		ПВХ
Цвет		БЕЛЫЙ
Толщина подушки		9СМ
Материал матраса		Эластичный полиуретан
Грузоподъемность		Не более 150 кг
Вес в полной комплектации		30.8 кг
<b>Комплектация:</b>		
Ложемент		+
Подушка с затычкой		+
Съемные ножки		+

Подлокотники	+
Инструкция по установке и руководство пользователя	+

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования, артикулы – без предварительного уведомления.**

### **Гарантия**

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев.

При обращении в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Телефон Сервисного Центра ООО «Медтехника Москва»: +7 (495) 5042651

Дата продажи: «      »                      20    г.

Генеральный директор  
ООО «Медтехника Москва

В.В. Катая