

Паспорт

Кушетка

КМФ

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.30 офис 121
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер: _____

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____



РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Кушетка предназначена для лежания 1 человека.
1.2. Кушетка изготовлена из панелей ДСП, обитых поролоном, обтянутых винилискожей и закрепленных на деревянном каркасе. Деревянный каркас имеет двойное покрытие, стойкое к дезинфекции. Угол наклона панели подголовника может изменяться при помощи регулируемого упора «Rastomat».

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	длина	
530	600	2000	26

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Ложка с каркасом в сборе	1
3.2	Ножка в сборе	2
3.3	Болт М8х80	8
3.4	Гайка М8	8
3.5	Шайба 8	8
3.6	Паспорт	1
3.7	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется гаечный ключ на 13 мм.

- 4.1. Распаковать компоненты кушетки.
4.2. Закрепить 4 ножки 3.2 на каркасе кушетки 3.1, для чего:
- положить кушетку деревянным каркасом вверх;
- приставить ножку изнутри в угол каркаса так, чтобы оба отверстия в ножке совпали с отверстиями в брусках каркаса;
- вставить с наружной стороны каркаса болты 3.3 сквозь отверстия в каркасе и ножке;
- надеть на резьбовые концы болтов шайбы 3.5 и навернуть гайки 3.4;
- повторить операции для остальных ножек.

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания».
5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
5.4. Место долговременного расположения мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.