

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.30 офис 121
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт

Стол для кабинета врача

СК 1/01



РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Стол предназначен для организации сидячего рабочего места.
- 1.2. Стол изготовлен из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
750	1300	600	20

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Столешница (1300x600)	1
2 и 3	Стенка левая и правая(730x520)	2
4	Стенка задняя (1248x350)	1
5	Винтовая стяжка	4
6	Заглушка винтовой стяжки	4
7	Эксцентриковая стяжка	4
8	Заглушка эксцентриковой стяжки	4
9	Подпятник	4
10	Ключ винтовой стяжки	1
11	Паспорт	1
12	Упаковка	1
13	Гвозди 1,2*20	8


Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

- 4.1. Распаковать компоненты стола.
- 4.2. При помощи ключа 10 винтовыми стяжками 5 соединить заднюю стенку стола 4 с боковыми стенками 2 и 3.
- 4.3. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 7 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриковыми стяжками 7.

- 4.4. Установить заглушки 6 винтовых стяжек 5 и заглушки 8 эксцентриковых стяжек 7.
- 4.5. Установить на нижние кромки стенок 2 и 3 подпятники 9.

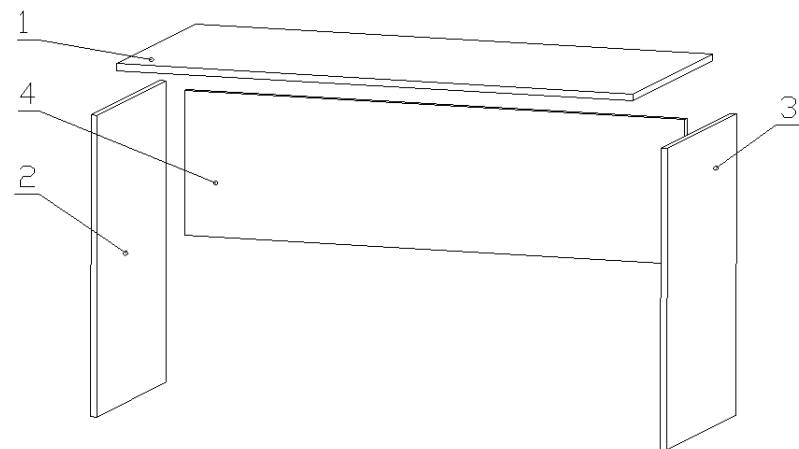

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.