

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.30 офис 121
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт

Стол для кабинета врача

СК 1/02



РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Стол предназначен для организации сидячего рабочего места и хранения личных вещей.
- 1.2. Стол изготовлен из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
850	1300	600	35

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол шт.
1	Столешница (1300х600)	1
2	Стенка боковая (830*520)	2
3	Панель (1258*70)	1
4	Панель между ящиками (476*130)	1
5	Задняя стенка (1248*350)	1
8	Фасад ящика с передней стенкой(143*640)	2
9	Боковая стенка ящика(450*70)	4
10	Задняя стенки ящика (563*70)	2
11	Ручка	2
12	Дно ящика ДВП (448*593)	2
13	Направляющие L450, комплект	2
14	Винт М4х35	4
15	Евровинт	16
16	Заглушка	5
17	Эксцентриковая стяжка	6
18	Саморез 3,5*16	16
19	Ключ винтовой стяжки	1
20	Гвозди 1*20	36
21	Подпятник	4
22	Паспорт	1
23	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

- 4.1. Распаковать компоненты стола.
- 4.2. Собираем ящик. При помощи ключа 19 и винтовых стяжек 15 соединить боковые стенки ящика 10 с задней стенкой и фасадом ящика 8.
- Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 12. При помощи винта 14 закрепить ручку 11 на фасады ящиков 8.
- 4.3. При помощи ключа 19 еврвинтами 15 соединить заднюю панель стола 5 сначала с боковой стенкой 2, затем боковыми стенками тумбы 2.
- 4.4. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 17 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриковыми стяжками 17. При помощи эксцентриковых стяжек 17 закрепить панель 4 к столешнице 1. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 13 к боковым стенкам 2 и панели 4, прижав направляющие к фасаду. При помощи еврвинтов 15 прикрепить панель 3 к боковым стенкам стола.
- 4.5. Установить ящики. При необходимости при помощи отвертки отрегулировать фасады регулировкой направляющих.
- 4.6. Установить заглушки эксцентриковых 17 и винтовых 15 стяжек.
- 4.7. При помощи гвоздей 20 закрепить подпятники на нижние кромки боковых стенок 2

