

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»

Факт: 606016 , Нижегородская обл.г. Дзержинск
8 8313 25-35-78 ул. Студенческая 30, офис 121

Заводской номер


Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт

Стол для кабинета врача

СК 1/03

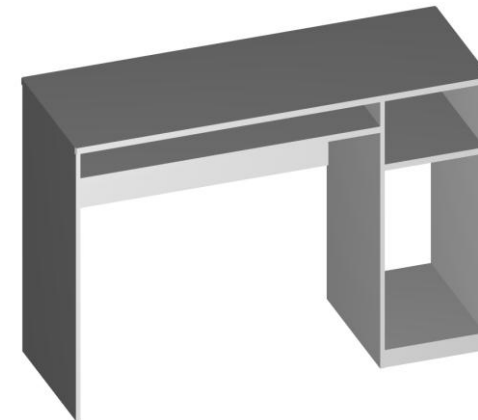

РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Стол предназначен для организации сидячего рабочего места и хранения личных вещей.
- 1.2. Стол изготовлен из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг и более
высота	ширина	глубина	
750	1300	600	48

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Столешница (1300x600)	1
2	Панели боковые (730x520)	3
3	Панель тумбы задняя 644*328)	1
	Панель стола задняя (904*350)	1
7	Панель ниши (328x520)	1
6	Дно тумбы (503*328)	1
8	Полка выдвижная (878*400)	1
9	Цоколь (70*328)	1
10	Напр. для выдвижной полки L-400	1 компл.
11	Винтовая стяжка	18
12	Заглушка винтовой стяжки	18
13	Эксцентриковая стяжка	6
14	Заглушка эксцентриковой стяжки	6
15	Подпятник	6
16	Ключ винтовой стяжки	1
17	Саморез 3,5*16	8
18	Паспорт	1
19	Упаковка	1
20	Гвозди 1,2*20	12

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

- 4.1. Распаковать компоненты стола.
- 4.2. При помощи ключа 16 винтовыми стяжками 11 соединить стойку среднюю 2 и стойку боковую правую 2 с нишей

7, дном тумбы 6 и цоколем 9

- 4.3 При помощи ключа 16 винтовыми стяжками 11 соединить стойку боковую левую 2 с панелью стола задней 5 и задней панелью тумбы 3.
- 4.4 С помощью шурупов 17 закрепить направляющие 10 на выдвижной полке 8.
- 4.5 С помощью шурупов 17 закрепить ответные планки направляющих 10 на стойку боковую левую 2 и стойку среднюю 2.
- 4.6. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 13 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриковыми стяжками 13.
- 4.7. Установить на нижние кромки панелей 2 подпятники 11 на расстоянии 20 мм от края.
- 4.8. Установить на головки винтовых стяжек 7 заглушки 8, а на эксцентриковые стяжки 9 заглушки 10 (исключая расположенные внутри тумбы).

