

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.30 офис 121
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:


Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт

Стол для кабинета врача

СК 2/03
(на цоколе)

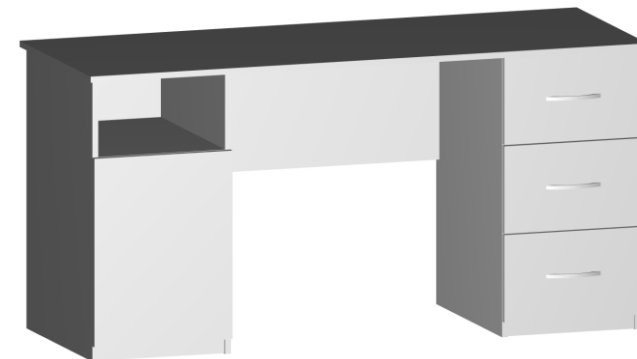

РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

1. Назначение продукции.

Стол предназначен для обустройства рабочего места специалиста.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
750	1500	600	70

3. Комплект поставкистола на опорах.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Столешница (1500х600)	1
2	Стенка боковая (730*520)	4
3	Дно тумбы(520*328)	2
4	Фасад ящика (216*358)	3
5	Задняя стенка тумбы(644*328)	2
6	Задняя панель ящика 270*150)	6
7	Панель ниши (503*328)	1
8	Полка съемная (500*326)	1
9	Дверка (435*358)	1
10	Подпятники	8
11	Ручка	4
12	Петля накладная	2
13	Полкодержатели	4
14	Винт М4х20	2
15	Евровинт	40
16	Заглушка	16
17	Эксцентриковая стяжка	8
18	Саморез 3,5* 6	32
19	Ключ винтовой стяжки	1
20	Боковая стенка ящика (450*150)	6
21	Дно ящика ДВПО (448*300)	3
22	Направляющие L 450, комплект	2
23	Гвозди 1*15	62
24	Шуруп 4*35	6
25	Цоколь (328*70)	2
26	Задняя панель стола (760*350)	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом. Для сборки потребуется крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

4.1. Распаковать компоненты стола.

4.2. Собираем правую тумбу. При помощи ключа 19 винтовыми стяжками 15 соединить две боковые стенки 2 с дном тумбы 3 и цоколем 25. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 22 к боковым стенкам 2, прижав направляющие к фасаду. При помощи эксцентриковых стяжек 17 соединить панель 7 с боковыми стенками 2.

Собираем ящик. При помощи ключа 19 и винтовых стяжек 15 соединить боковые стенки ящика 20 с задней стенкой и фальш-панелью ящика 6.

Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 23 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 21.

Собираем тумбу левую. При помощи ключа 19 винтовыми стяжками 15 соединить две боковые стенки 2 с дном тумбы 3 и панелью 7 и цоколем 25. Установить на дверку 9 шарнирные петли 12, закрепив их саморезами 18. Закрепить саморезами 18 на правой боковой стенке тумбы 2 планки петель 12 по месту. При помощи регулировочных винтов шарнирных петель 12 отрегулировать положение и величину зазоров дверки 9.

4.3. При помощи ключа 19 евровинтами 15 соединить заднюю панель стола 26 и задние панели тумб 5 с тумбами.

4.4. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 17 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриковыми стяжками 17.

4.5. Положить без перекоса подсобранный каркас стола на ровную поверхность столешницей вниз.

При помощи гвоздей установить подпятники

4.6. Поставить стол в исходное положение. При помощи винта 14 закрепить ручку 11 на дверку 9 и на фасады ящиков 4. Установить внутри тумбы полкодержатели 13 и поставить полку 8. Установить ящики по месту и при необходимости отрегулировать фасады регулировкой направляющих.

4.7. Установить заглушки эксцентриковых 17 и винтовых 15 стяжек.

