

**СТОЛИКИ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ**  
**передвижной металлический для стоматолога, на колесах , с одним, двумя, тремя выдвижными ящиками**  
**СМ 547-01-«МСК» (МСК-547-01) , СМ 547-02-«МСК» (МСК-547-02), СМ 547-03-«МСК» (МСК-547-03)**  
**ТУ 9451-022-52962725-2008**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1. Столики манипуляционные (далее по тексту — столики) предназначены для оснащения стоматологических, смотровых, процедурных кабинетов больниц и поликлиник.  
 1.2. Столики изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Основные параметры и размеры.  
 2.1.1. Основные параметры и размеры столиков указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров		
	СМ547-01- «МСК»	СМ547-02 - «МСК»	СМ547-03 - «МСК»
1. Габаритные размеры каркаса (ВхДхШ), мм , ±5 мм	730x500x425		
2. Высота с колёсами, мм , ±5 мм	805		
3. Высота до раб. поверхности, мм, ±5 мм	800		
5. Масса, кг, не более	20	25	30
6. Количество ящиков	1	2	3

**2.2. Характеристики:**

- 2.2.1. Столик выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 25кг.  
 2.2.2. Столик установлен на 4 колеса диаметром 50 мм. Два из них с тормозом. Колеса вращаются вокруг вертикальной оси.  
 2.2.3. Усилие, необходимое для перемещения столика с номинальной нагрузкой по ровному бесшовному полу не более 50 Н (5 кгс), при этом колеса столиков должны быть сориентированы в направлении движения.  
 2.2.4. Все металлические части столика имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «МЕДЛИАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.  
 2.2.5. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.  
 2.2.6. Поверхность столика устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства, ГОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.  
 2.2.7. Столик при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения УХЛ 4.2.  
 2.2.8. Столик, упакованный в транспортную тару, сохраняет работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444.  
 2.2.9. Средний срок службы столика до списания не менее 8 лет.  
 За критерий предельного состояния столика принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки столиков соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование изделия	Количество, шт.		
	СМ547-01 - «МСК»	СМ547-02 - «МСК»	СМ547-03 - «МСК»
Корпус с ящиком	1	-	-
Корпус с двумя ящиками	-	1	-
Корпус с тремя ящиками	-	-	1
Колеса диаметром 50 мм	4	4	4
Винт М10х 25	4	4	4
Шайба 10 пружинная	4	4	4
Стекло	1	1	1
Паспорт	1	1	1

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Каркас столика изготовлен из стальных труб прямоугольного сечения.  
 4.2. Корпус и ящики изготовлены из углеродистой стали толщиной 0,8мм.  
 4.3. В зависимости от модели столик имеет один (СМ 547-01 - «МСК»), два (СМ 547-02 - «МСК») или три (СМ 547-03 - «МСК») выдвижных ящика .  
 4.4. Сборка столика производится при помощи стандартных крепежных изделий.

**5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. К сборке и эксплуатации столиков допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила его эксплуатации.

**6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

- 6.1. После транспортирования столиков в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.  
 6.2. Распаковать столик, проверить целостность покрытия и целостность стекла.  
 6.3. Проверить комплектность.  
 6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина) .

**7. ПОРЯДОК СБОРКИ**

- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.  
 7.2. Осуществить сборку согласно инструкции.  
 7.3. Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепление колес.

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 8.1. Техническое обслуживание включает в себя осмотр целостности покрытий столиков и проверку надежности крепления резьбовых соединений.  
 8.2. Особое внимание необходимо обращать на надежность крепления колес. Периодически, не реже 1 раза в месяц, прочищать их от грязи, производить смазку подшипников и затяжку винтов.  
 8.3. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

**9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 9.1. Столики в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С .  
 9.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред, воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

**10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.  
 10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода столиков в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.  
 10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Столики манипуляционные СМ 547-01- «МСК», СМ 547-02- «МСК», СМ 547-03- «МСК»

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Соответствуют техническим условиям ТУ 9451-52962725-2008 и признаны годными к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку. \_\_\_\_\_

М. П.

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Изделие медицинской техники \_\_\_\_\_ на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия \_\_\_\_\_

номер ГОСТ или ТУ \_\_\_\_\_

Номер и дата выпуска \_\_\_\_\_

Приобретен о \_\_\_\_\_

дата, подпись, штамп торгующей организации \_\_\_\_\_

Производитель: ООО «Медстальконструкция»  
 Россия, 450024, Рб. с. Уфа, ул. Глазьевская, д. 1/1, тел. (847)291-20-81, 292-26-00

**Инструкция по сборке столиков манипуляционных  
СМ547-01- «МСК», СМ547-02- «МСК», СМ547-03- «МСК»**

1 . Колёса присоединить к каркасу, посредством винтов М10 и шайб 10 пружинных.

МСК 547-03

