

**ПАСПОРТ****ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»**

**СТОЛ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПДМС - «МСК»: МД-900.00 из набора мебели медицинской  
ТУ 9452-037-52962725-2017**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1 Стол медицинской сестры (далее по тексту — стол) предназначен для организации рабочего места дежурного медицинского работника в больницах, в санаториях и т.д.  
1.2 Стол изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Габаритные размеры, ДхШхВ: 2615x2415x1215 мм, ±5 мм.  
2.2. Масса не более 135 кг.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1.

№ поз.	Наименование комплектующего	Кол-во, шт.	Размеры, мм.
1	Стенка боковая надстройки левой и правой секций	4	450x250x16
2	Стенка средняя надстройки левой и правой секций	2	450x234x16
3	Крышка надстройки левой секции	1	1500x250x16
4	Полка надстройки левой секции	1	734x234x16
5	Стенка задняя надстройки левой секции	1	1468x450x16
6	Стенка боковая стола левой и правой секций	4	734x700x16
7	Столешица левой секции	1	1500x700x16
8	Стенка задняя стола левой секции	1	1468x734x16
9	Столешица правой секции	1	1300x700x16
10	Стенка задняя стола правой секции	1	1268x734x16
11	Полка надстройки правой секции	1	634x234x16
12	Крышка надстройки правой секции	1	1300x250x16
13	Стенка задняя надстройки правой секции	1	1268x450x16
14	Стенка боковая надстройки угловой секции	2	450x164x16
15	Крышка надстройки угловой секции	1	1580x180x16
16	Полка надстройки угловой секции	1	940x164x16
17	Стенка задняя надстройки угловой секции	1	1552x450x16
18	Стенка боковая стола угловой секции	2	734x483x16
19	Столешица угловой секции	1	1580x500x16
20	Стенка задняя стола угловой секции	1	1545x734x16

**3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 3.1. Стол собран из элементов, выполненных из ламинированного ДСП (ЛДСП).  
3.2. Стол представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию.  
3.3. Стол имеет три секции:  
- первая секция (левая) — стол с надстройкой с тремя отделениями; (1500x700x1215)  
- вторая секция (правая) — стол с надстройкой с тремя отделениями; (1300x700x1215)  
- третья секция (угловая) — центральный столик с надстройкой с четырьмя отделениями. (1580x500x1215)  
3.4. Все кромки облицованы кромочной лентой ПВХ.  
3.5. Стол собирается при помощи стандартных крепежных изделий.

**4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 4.1. К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

**5. ФУРНИТУРА.**

- 5.1. Комплект фурнитуры соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№ поз.	Наименование комплектующего	Кол-во, шт.
1	Стяжка-эксцентрик ТЕ 15 хром	35
2	Шток	35
3	Конфирмат	50
4	Ключ шестигранный	1
5	Шкант 8x30	80
6	Шуруп 2А3-13 ГОСТ 1145-75	40
7	Подпятник	18
8	Заглушка эксцентрик	20
9	Заглушка конфирмат	50

**6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

- 6.1. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.  
6.2. Распаковать изделие и проверить целостность покрытия и целостность элементов секций.  
6.3. Проверить комплектность.  
6.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

**7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 7.1. Стол имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

**8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 8.1. Стол в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.  
8.2. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

**9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.  
9.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.  
9.3. Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.  
9.4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

**10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Стол медицинской сестры ПДМС «МСК»: МД-900.00 из набора мебели медицинской \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М. П.

Соответствует ТУ 9452-037-52962725-2017 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_

(Хабибуллин Р.Р)

**11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие \_\_\_\_\_

наименование и тип изделия

Номер и дата выпуска

номер ГОСТ или ТУ


Приобретено \_\_\_\_\_

дата, подпись, штамп торгующей организации

**Производитель:** ООО «Медстальконструкция»

Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

## Схема сборки стола МД-900.00

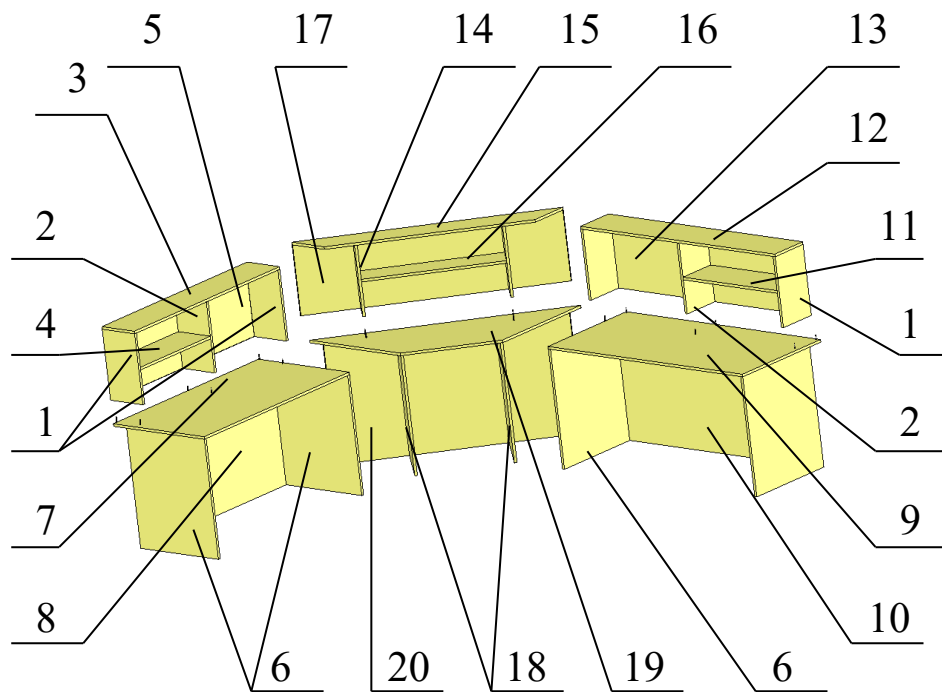

## Инструкция по сборке

1. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов соединить боковые (1) и среднюю (2) стенки надстройки левой секции с крышкой (3) и, при помощи конфирматов, с задней стенкой (5) и полкой (4).
2. Соединить при помощи конфирматов и шкантов боковую стенку (6) стола левой секции с задней стенкой (8).
3. Соединить при помощи конфирматов и шкантов надстройку со столешницей (7) левой секции.
4. Соединить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов столешницу с боковыми и задней стенками стола левой секции.
5. Аналогично собрать правую секцию, используя детали поз. 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13.
6. Соединить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов боковые стенки (14) надстройки угловой секции с крышкой (15) и, при помощи конфирматов, с полкой (16) и задней стенкой (17).
7. Соединить при помощи конфирматов и шкантов боковую стенку столика (18) угловой секции с задней стенкой (20).
8. Соединить при помощи конфирматов и шкантов надстройку со столешницей (19) угловой секции.
9. Соединить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов столешницу с боковыми и задней стенками столика угловой секции.
10. Под боковые стенки столов правой, левой и угловой секций с помощью шурупов установить подпятники.
11. Установить заглушки.
12. Установить стол на рабочее место.