

**СТОЛ ПРИКРОВАТНЫЙ**  
**МИ 02.08.02.00.00 (МСК-511)**  
**МИ 02.08.01.00.00 (МСК-511М)**  
**ТО 5621-0277046598-3-2007**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1. Стол прикроватный (далее по тексту — стол) предназначен для оснащения общественных учреждений.  
 1.1.1. Стол изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****2.1. Основные параметры и размеры.**

- 2.1.1. Основные параметры и размеры стола указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров	
	МСК-511, МСК-511 М	
1. Габаритные размеры стола, мм, ±5 мм	750x 400	
2. Пределы регулировки высоты, мм, ±5 мм	750...1100	
3. Масса, кг, не более	15	
4. Количество полок, шт.	1	
5. Материал столешницы: ламинированное ДСП	+	
6. Номинальная нагрузка, кг, не более	20	
7. Диаметр колес, мм	50	

**2.2. Характеристики (свойства):**

- 2.2.1. Стол выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 20 кг.  
 2.2.2. Стол имеет 4 колеса, диаметром не менее 50 мм.  
 2.2.3. Усилие, необходимое для перемещения стола с номинальной нагрузкой не более 100 Н (10 кг), при этом колеса должны быть ориентированы в направлении движения.  
 2.2.4. Каркас стола имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.  
 2.2.5. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.  
 2.2.6. Поверхность стола устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НД на эти средства и ГОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.  
 2.2.7. Стол при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения УХЛ 4.2.  
 2.2.8. Стол, упакованный в транспортную тару, сохраняет работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444.  
 2.2.9. Средний срок службы стола до списания не менее 6 лет.  
 За критерий предельного состояния стола принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки стола соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование изделия	Количество, шт.	
	МСК 511	МСК 511 М
Основание столика	1	1
Вертикальная направляющая	1	1
Стойка	1	1
Столешница из ламинированного ДСП	1	1
Винт М6х 45 ГОСТ 17475-80	2	2
Винт М6х35 ГОСТ 17475-80	3	3
Гайка М6 ГОСТ 5915-70	5	5
Шайба 6 ГОСТ 6402-70	5	5
Шуруп 5 x 15 ГОСТ 1491-707473-70	8	8
Винт М 4 x 6 ГОСТ 17473 - 70	1	1
Винт М10х25 ГОСТ 11738-72	4	-
Рукоятка для фиксации держателя в основании столика	1	1
Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402-70	4	-
Колеса мебельные диаметром 50 мм	-	4
Колеса с резиновым покрытием (серая резина)	4	-
Паспорт	1	1

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Стол имеет основание, в вертикальную направляющую которого вставлена стойка столешницы.  
 4.2. К стойке прикреплена столешница из ламинированного ДСП. Крепление столешницы к стойке производится при помощи винтов М 6.  
 4.3. Направляющие основания и столешницы имеют квадратное сечение, что препятствует вращению столешницы вокруг вертикальной оси.  
 4.4. Основание установлено на четыре колеса.

**5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию изделия и правила его эксплуатации.  
 6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ  
 6.1. После транспортирования стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.  
 6.2. Распаковать стол и проверить целостность покрытия и целостность столешницы.  
 6.3. Проверить комплектность.  
 6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).  
 7. ПОРЯДОК СБОРКИ  
 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.  
 7.2. Осуществить сборку согласно инструкции.  
 7.3. Перед началом эксплуатации проверьте крепление колес и надежность фиксации стойки в направляющей.  
 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 8.1. Стол не требует специального технического обслуживания. Рекомендуется 1 раз в полгода проверять надежность крепления колес и при необходимости производить их затяжку. Требуется также проверять надежность работы рукоятки для фиксации держателя столешницы в основании.

**9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 9.1. Стол в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С..  
 9.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.  
 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.  
 10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.  
 10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Стол прикроватный МСК -511, МСК-511 М \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М. П.

Соответствует техническим условиям ТО 5621-0277046598-3-2007 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт в течение гарантийного срока

Изделие \_\_\_\_\_

наименование и тип изделия

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска \_\_\_\_\_

Приобретено \_\_\_\_\_

дата, подпись, штамп торгующей организации

Производитель: ООО «Медстальконструкция»

Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

## СХЕМА СБОРКИ стола прикроватного

1. Прикрутить колеса к основанию.
2. Прикрепить вертикальную направляющую к основанию столика при помощи винтов, шайб и гаек.
3. В направляющую вставить стойку столешницы.
4. Установить столешницу на стойку при помощи винтов, шайб и гаек.

